


VARIANTE **A.2-1**

(Zwei Abstriche, es verbleibt am Ende *ein* Tupfer im Probenröhrchen)

01

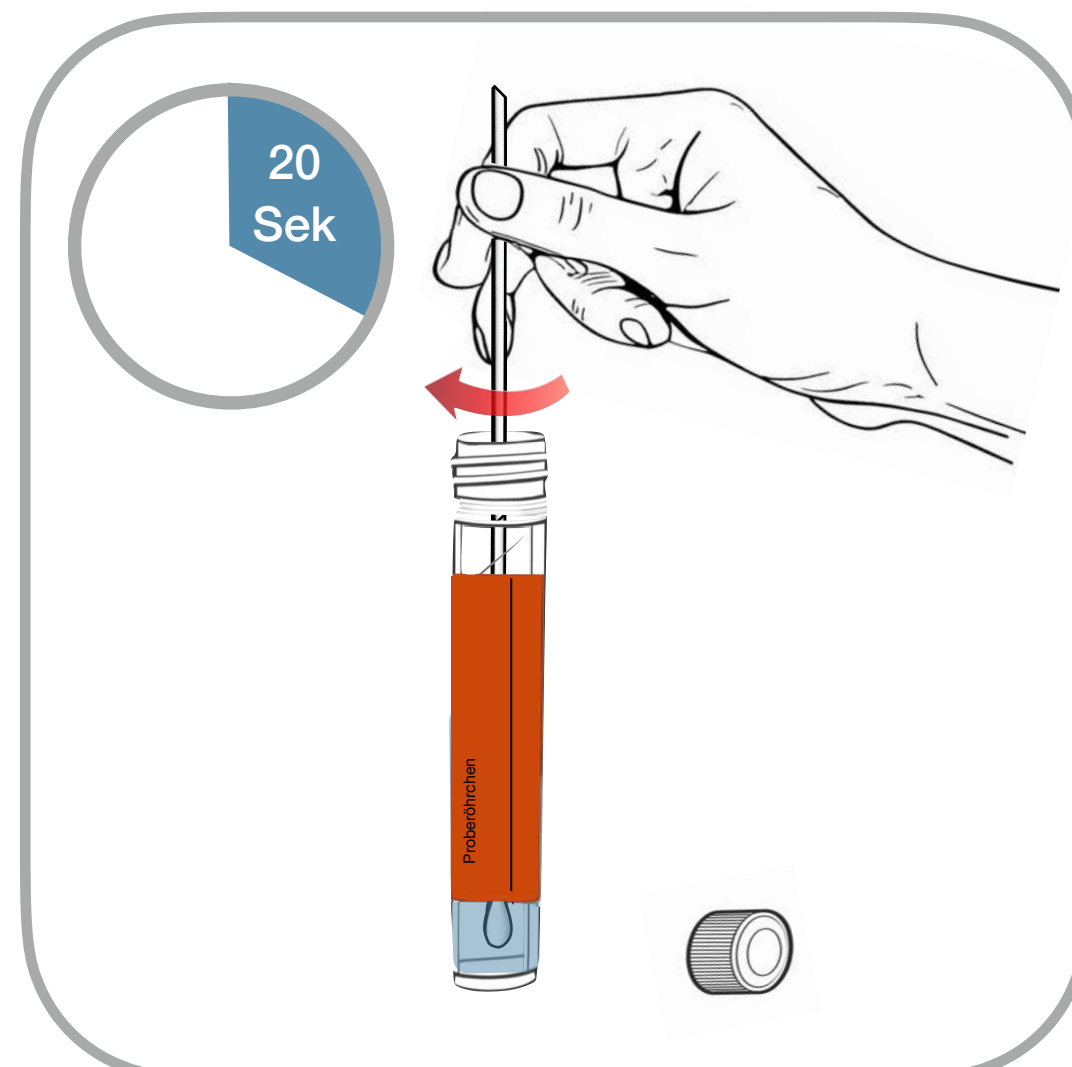

Tupfer des ersten Abstrichs für 20 Sekunden in die Flüssigkeit einrühren.

02



Tupfer innen am Rand ausdrücken.

03




Tupfer danach entsorgen, das Röhrchen weiter nutzen.

04




Tupfer des *zweiten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

05

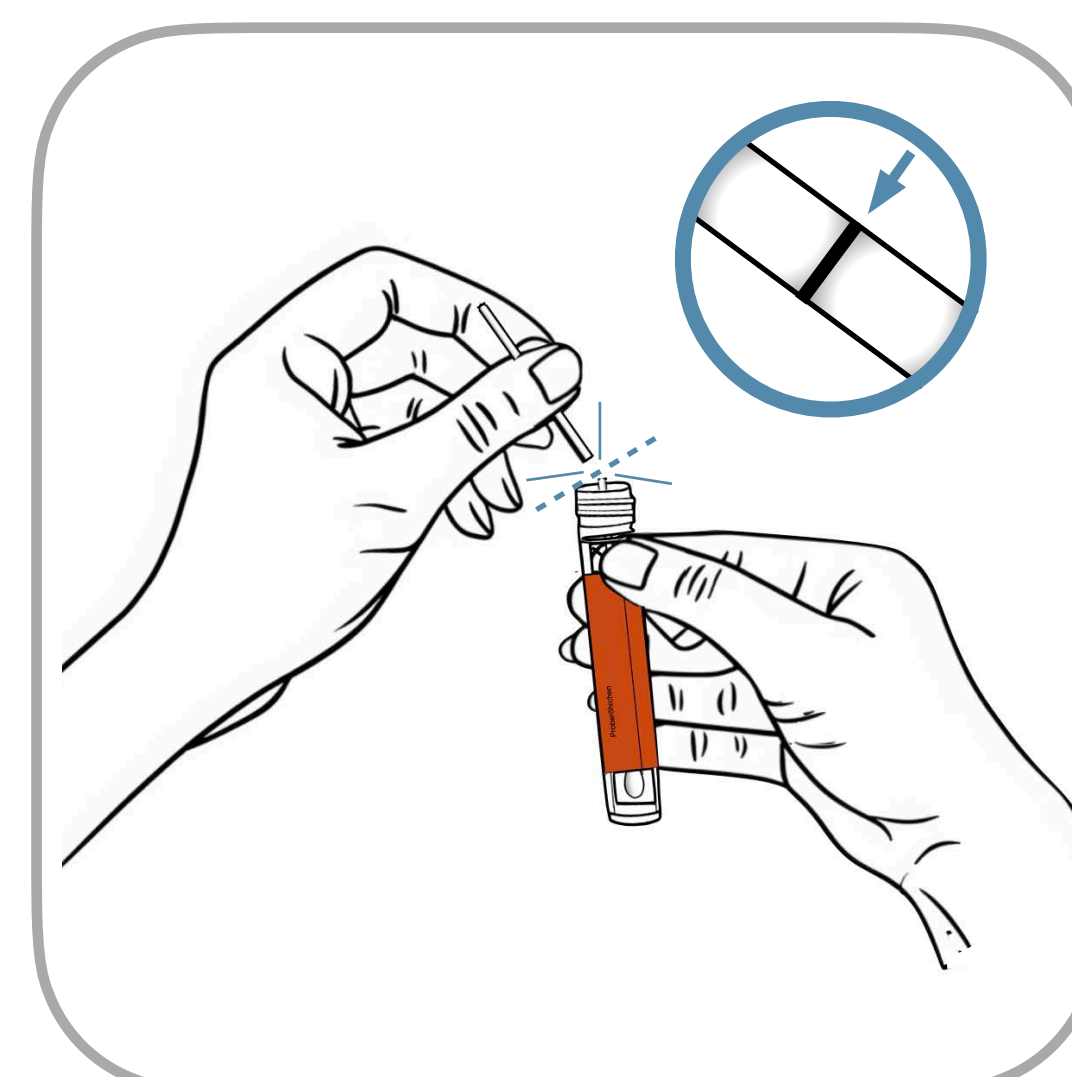


Tupfer an der Markierung abbrechen.

06

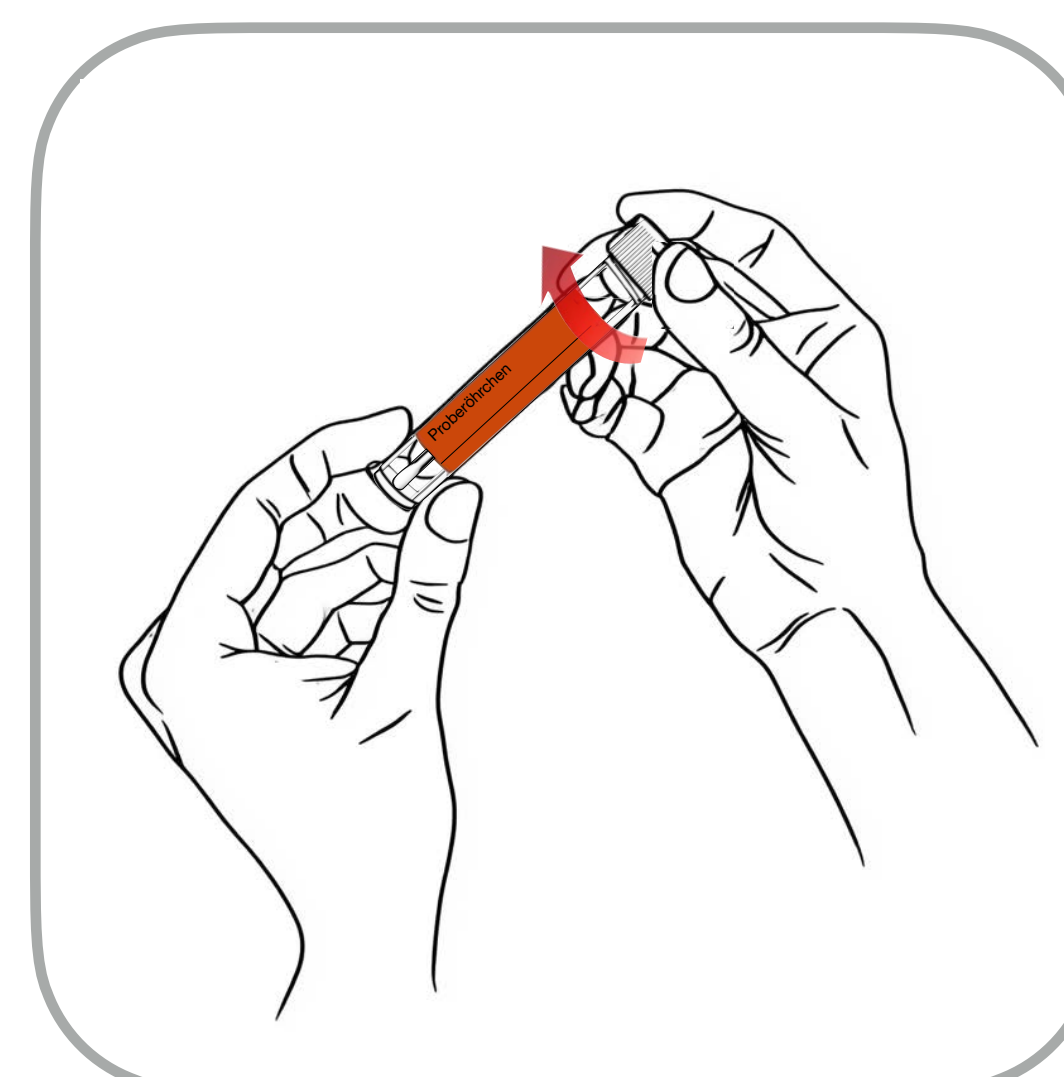

Zum Verschließen den Deckel **NUR** seitlich anfassen (**NICHT** die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.

07

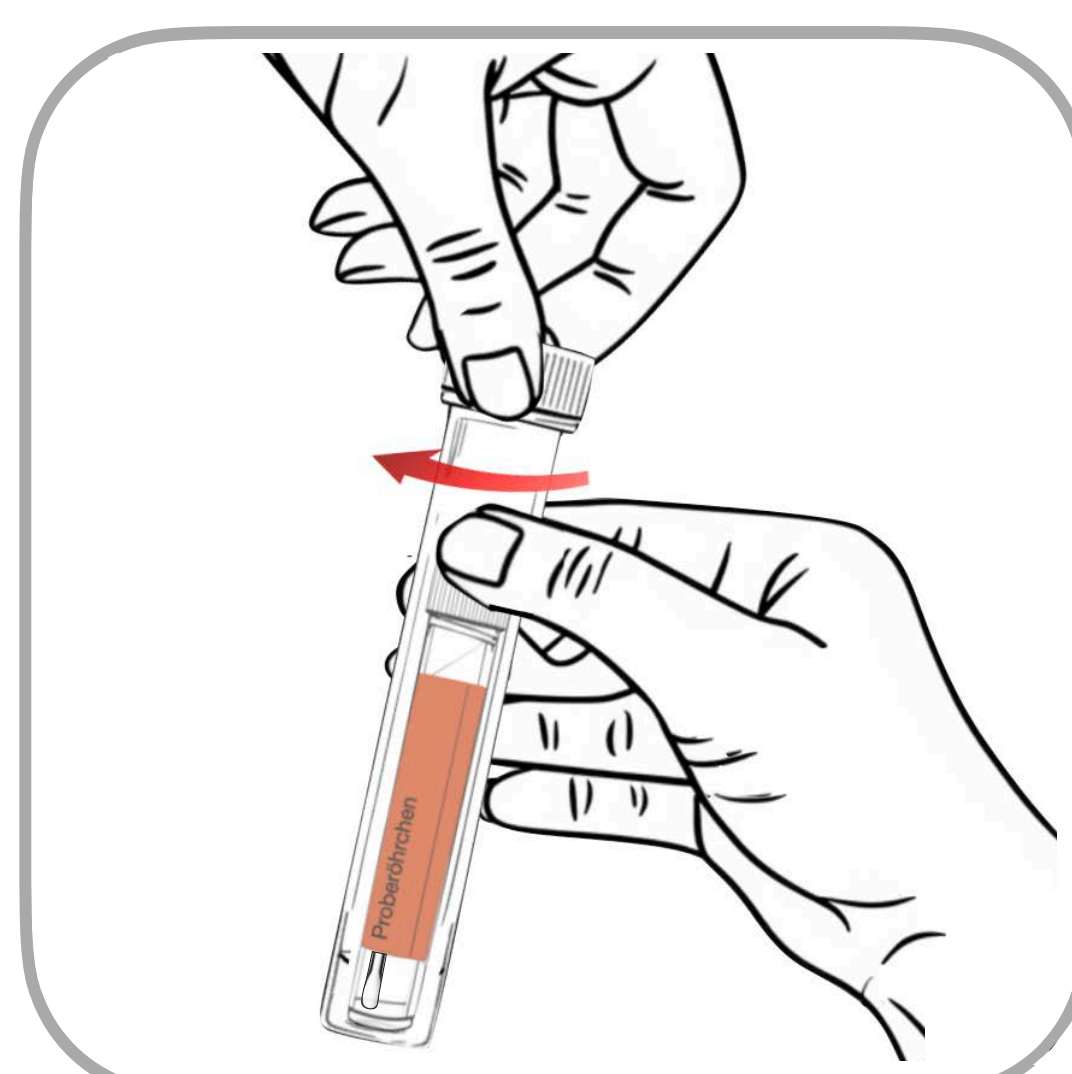

Probenröhrchen in das große Umverpackungsröhrchen stecken und dieses zuschrauben.



HINWEIS:

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.