



VARIANTE **A.2-2**

(Zwei Abstriche, es verbleiben am Ende **zwei** Tupfer im Probenröhrchen)

01



Tupfer des *ersten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

02



Tupfer an der Markierung abbrechen.

03




Tupfer des *zweiten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

04



Tupfer an der Markierung abbrechen.

05

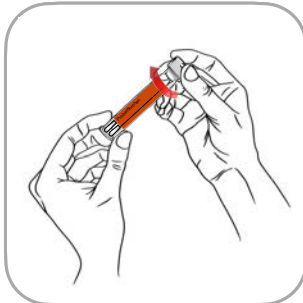

Zum Verschließen den Deckel **NUR** seitlich anfassen (NICHT die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.

06



Probenröhrchen in das große Umverpackungsröhrchen stecken und dieses zuschrauben.

HINWEIS:

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.

