




VARIANTE **A.3-1**

(Drei Abstriche, es verbleibt am Ende *ein* Tupfer im Probenröhrchen)

SEITE 1/2

01

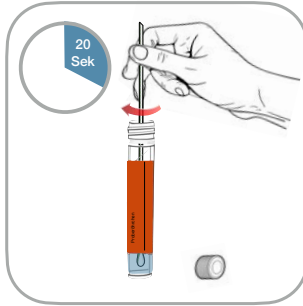

Tupfer des *ersten* Abstrichs für 20 Sekunden in die Flüssigkeit einrühren.

02




Tupfer innen am Rand ausdrücken.

03



Tupfer danach entsorgen, das Röhrchen weiter nutzen.

04

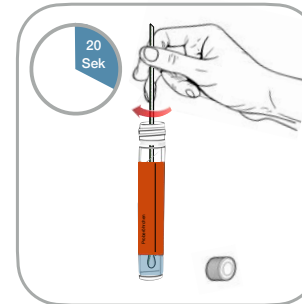

Tupfer des *zweiten* Abstrichs für 20 Sekunden in die Flüssigkeit einrühren.

05



Tupfer innen am Rand ausdrücken.

06



Tupfer danach entsorgen, das Röhrchen weiter nutzen.

**HINWEIS:**

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.





VARIANTE **A.3-1**

(Drei Abstriche, es verbleibt am Ende *ein* Tupfer im Probenröhrchen)

SEITE 2/2

07



Tupfer des *dritten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

08




Tupfer an der Markierung abbrechen.

09



Zum Verschließen den Deckel **NUR** seitlich anfassen (NICHT die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.

10

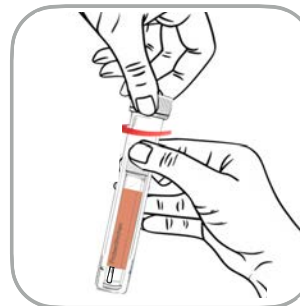

Probenröhrchen in das große Umverpackungsröhrchen stecken und dieses zuschrauben.

**HINWEIS:**

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.

