



VARIANTE **U.2-2**


(Zwei Abstriche, es verbleiben am Ende zwei Tupfer im Probenröhrchen)

01



Tupfer des *ersten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

02

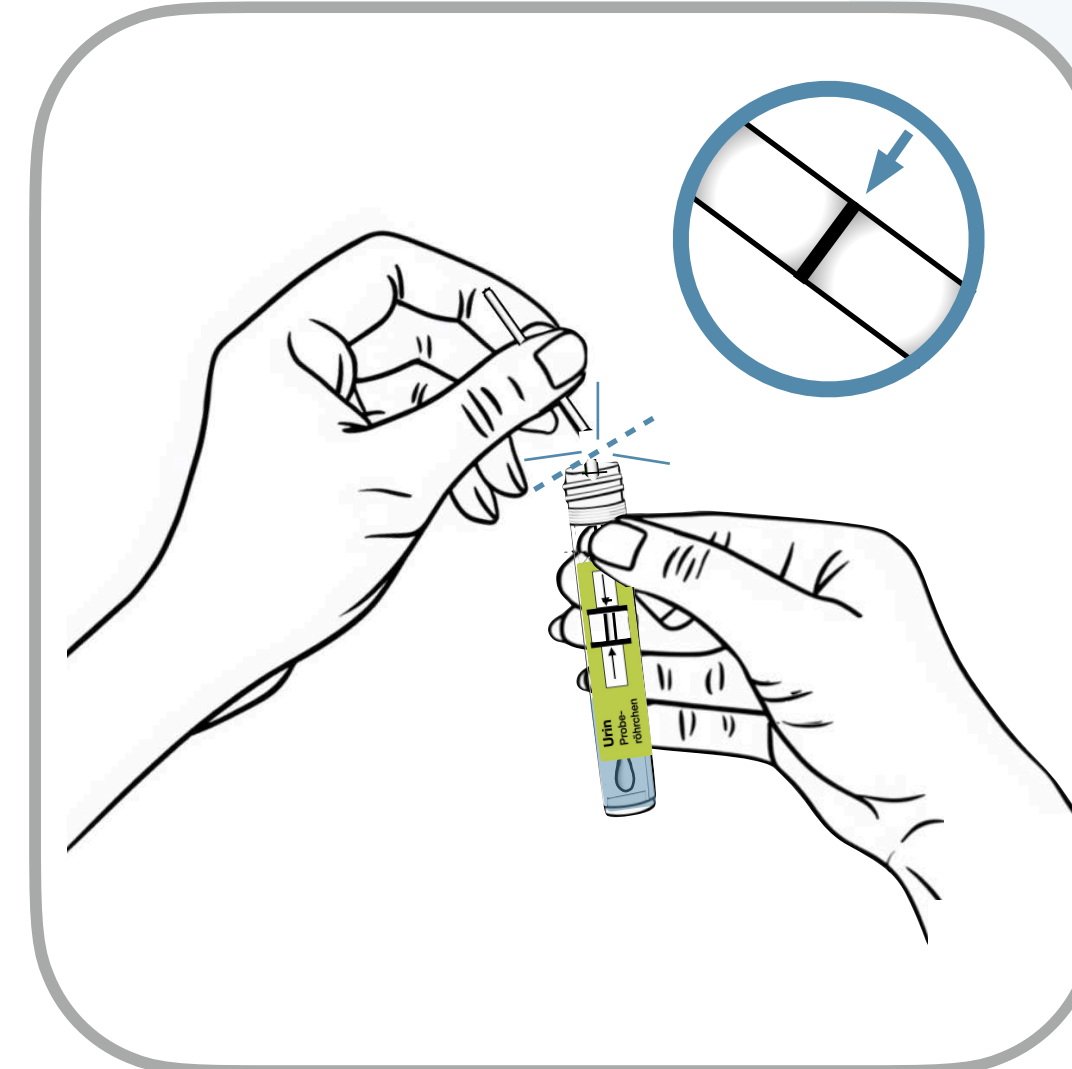


Tupfer an der Markierung abbrechen.

03




Tupfer des *zweiten* Abstrichs mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.

04

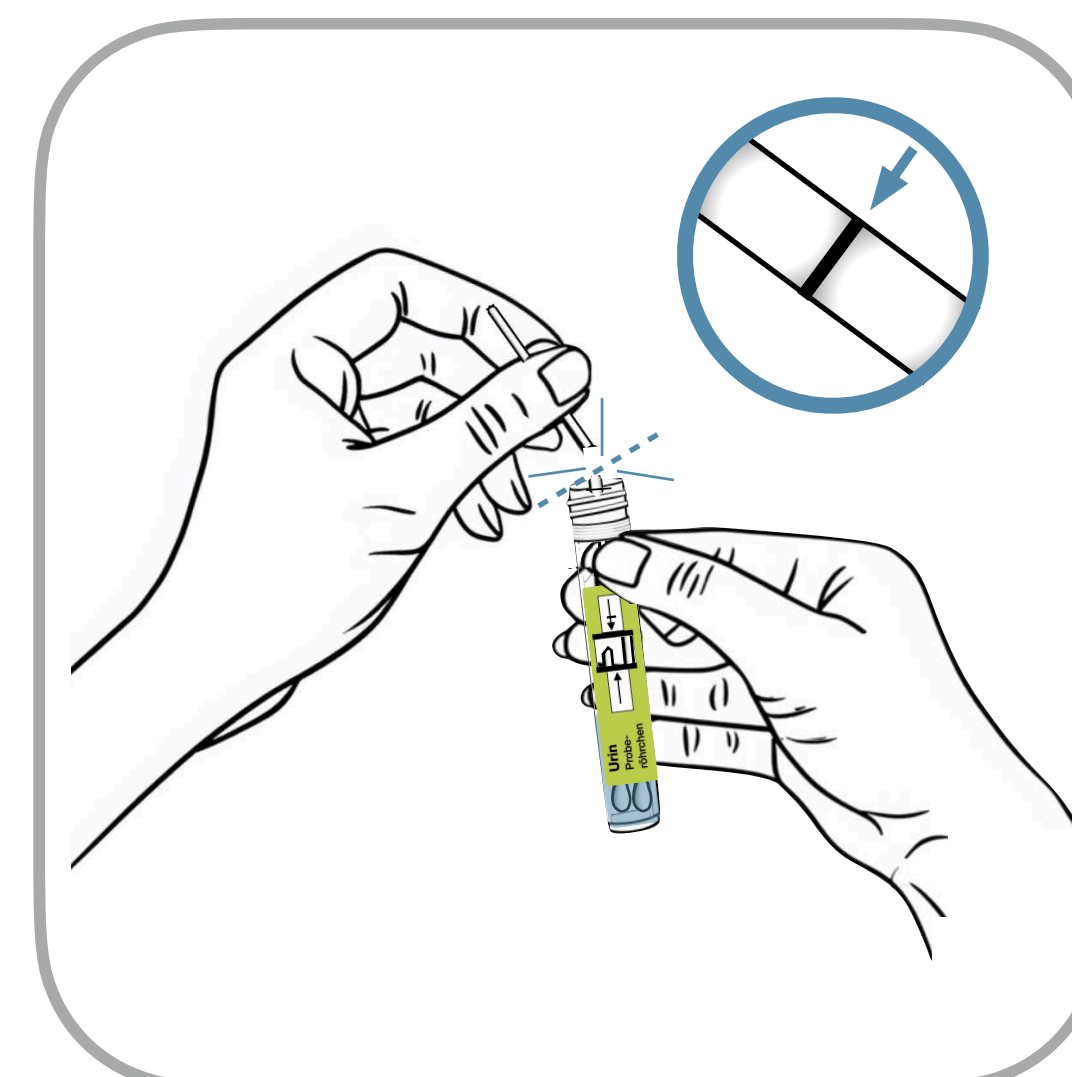


Tupfer an der Markierung abbrechen.

05

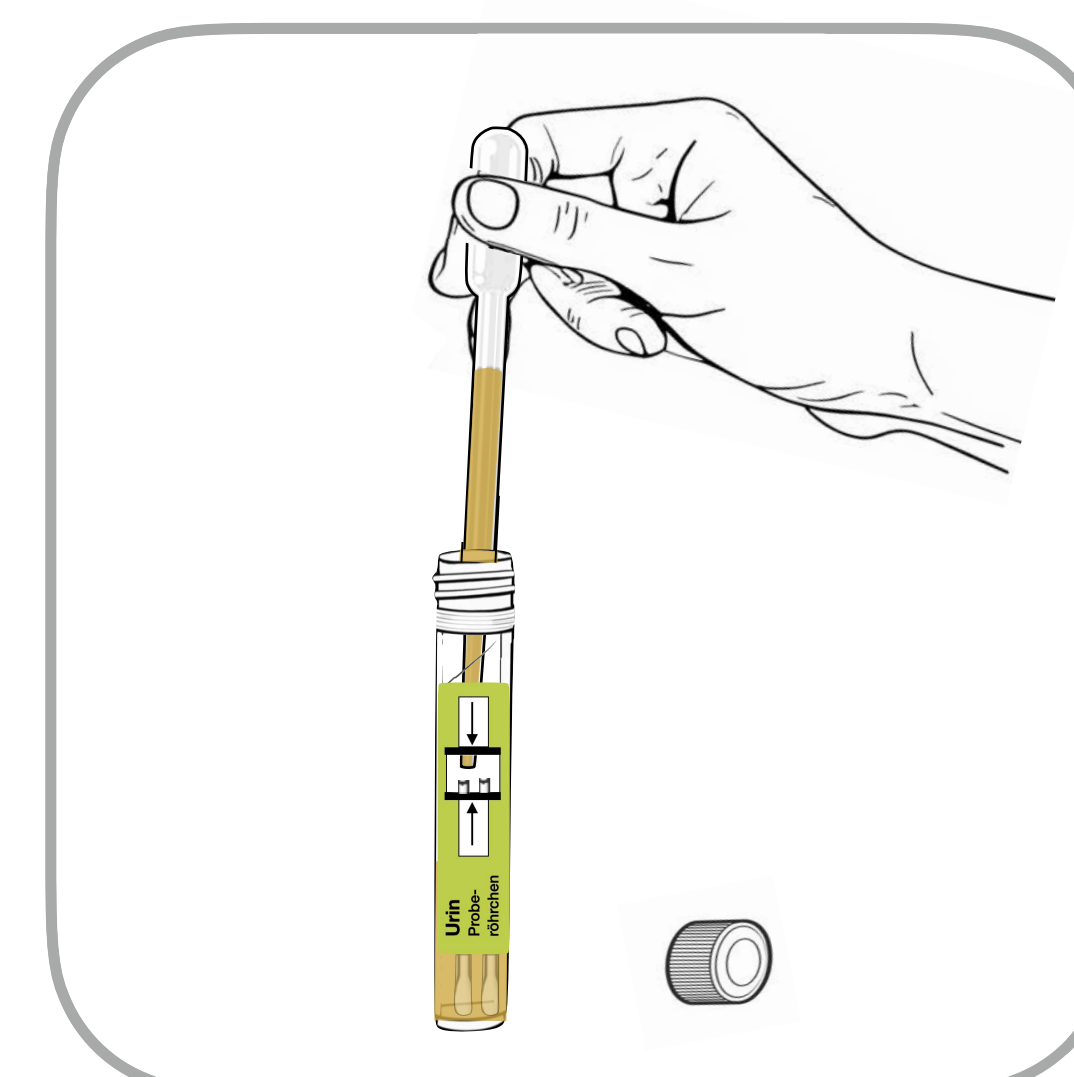


Urin aus der Pipette in das Probenröhrchen entleeren. Dazu die Pipette am oberen Ende zusammendrücken.

06

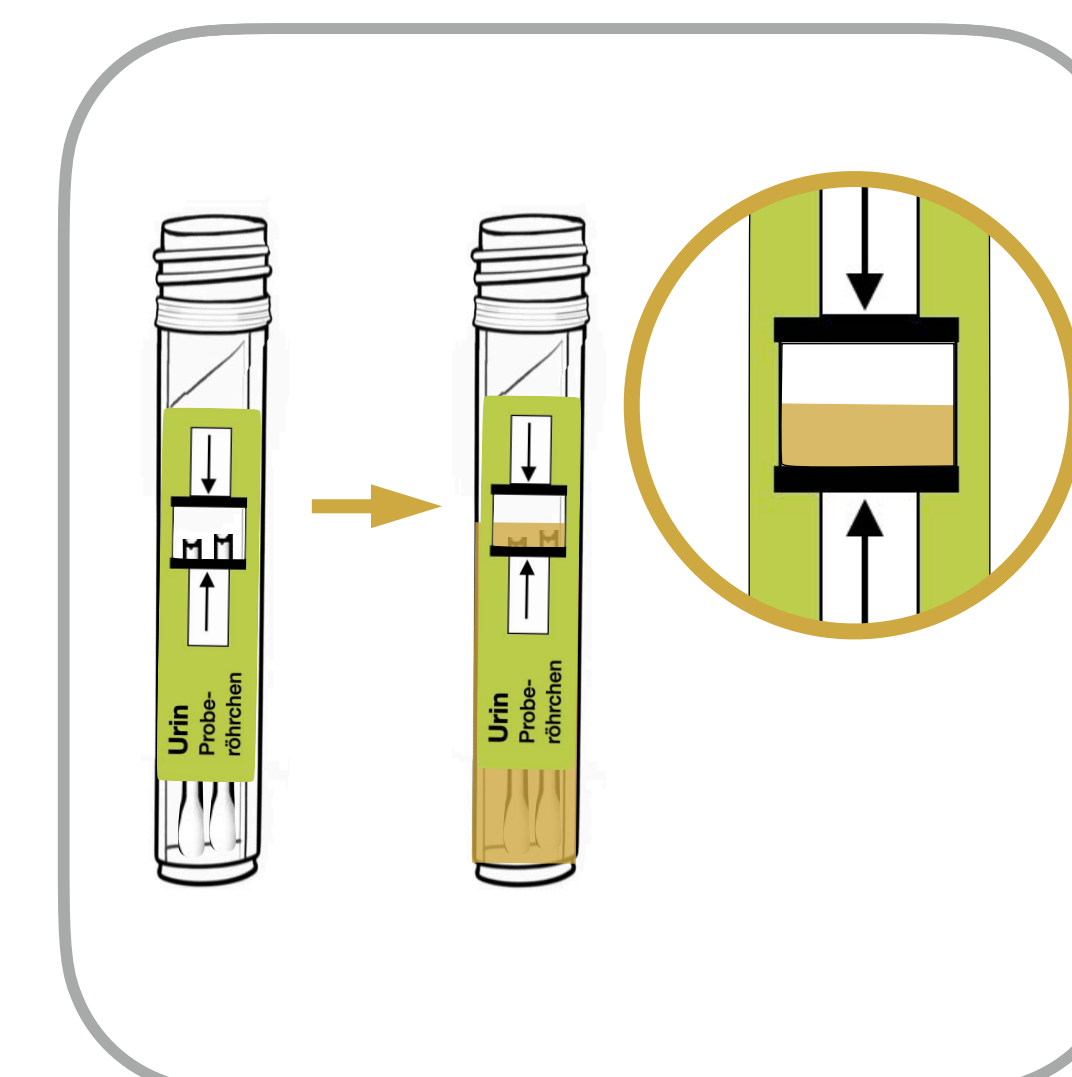


Das Röhrchen bis in die Mitte des Sichtfensters mit Urin befüllen.

07

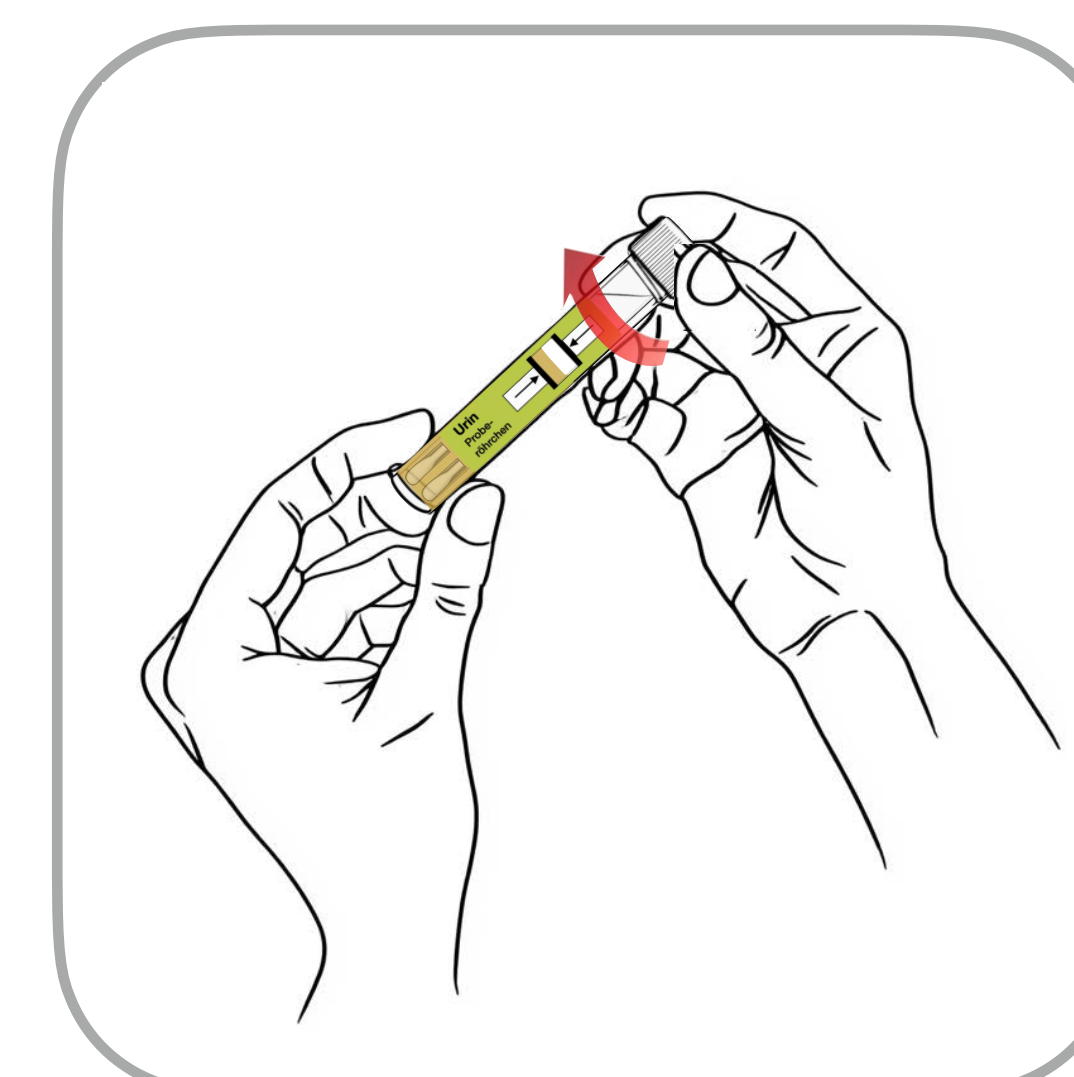

Zum Verschließen den Deckel **NUR** seitlich anfassen (NICHT die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.

08

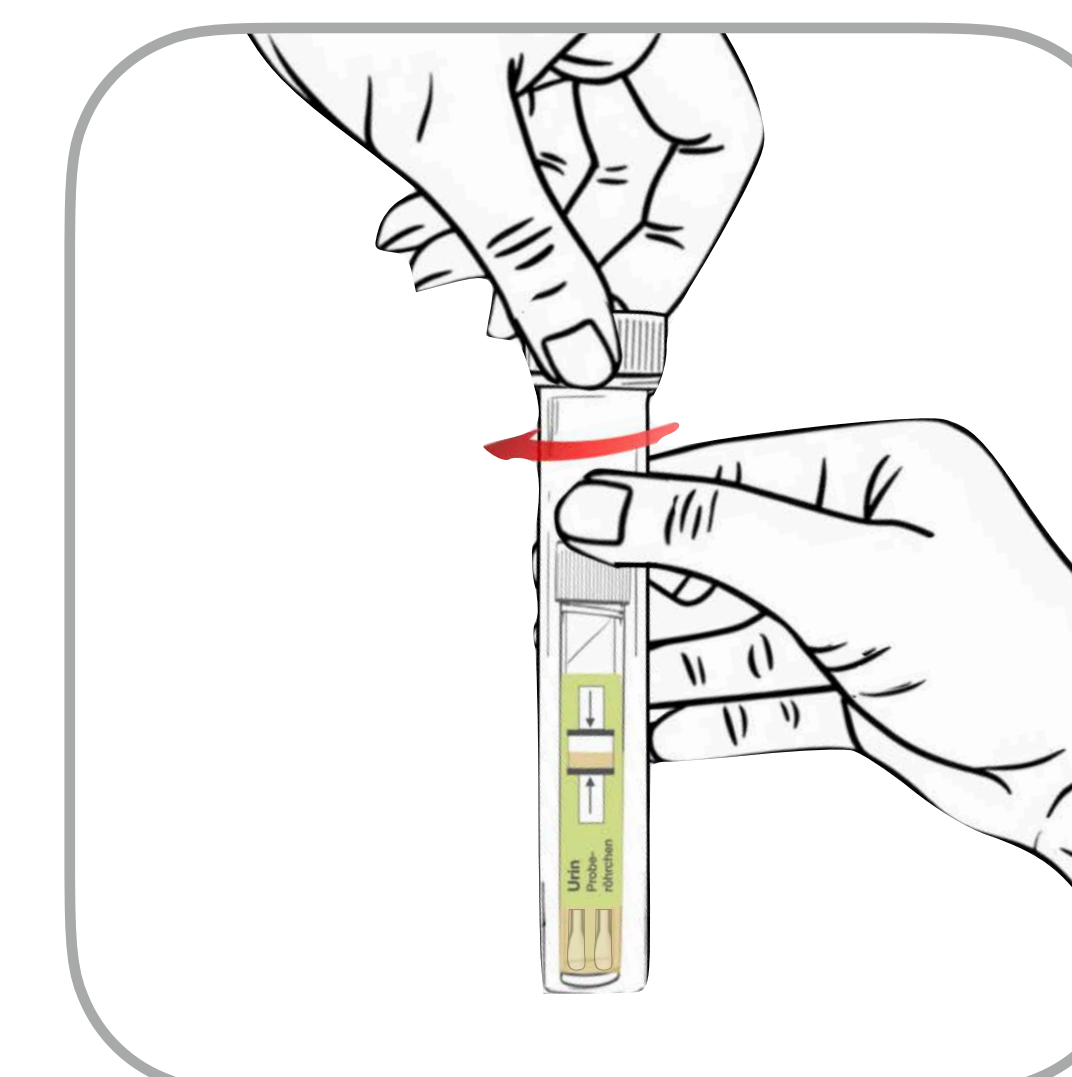

Probenröhrchen in das große Umverpackungsröhrchen stecken und dieses zuschrauben.



HINWEIS:

Beim Pooling werden mehrere Proben zusammen in einem Röhrchen gesammelt.

Das weitere Vorgehen und der Materialversand werden in den entsprechenden Anleitungen für die einzelnen Probenentnahmen erklärt.

