






MATERIAL

Probenröhrchen +
Abstrichtupfer

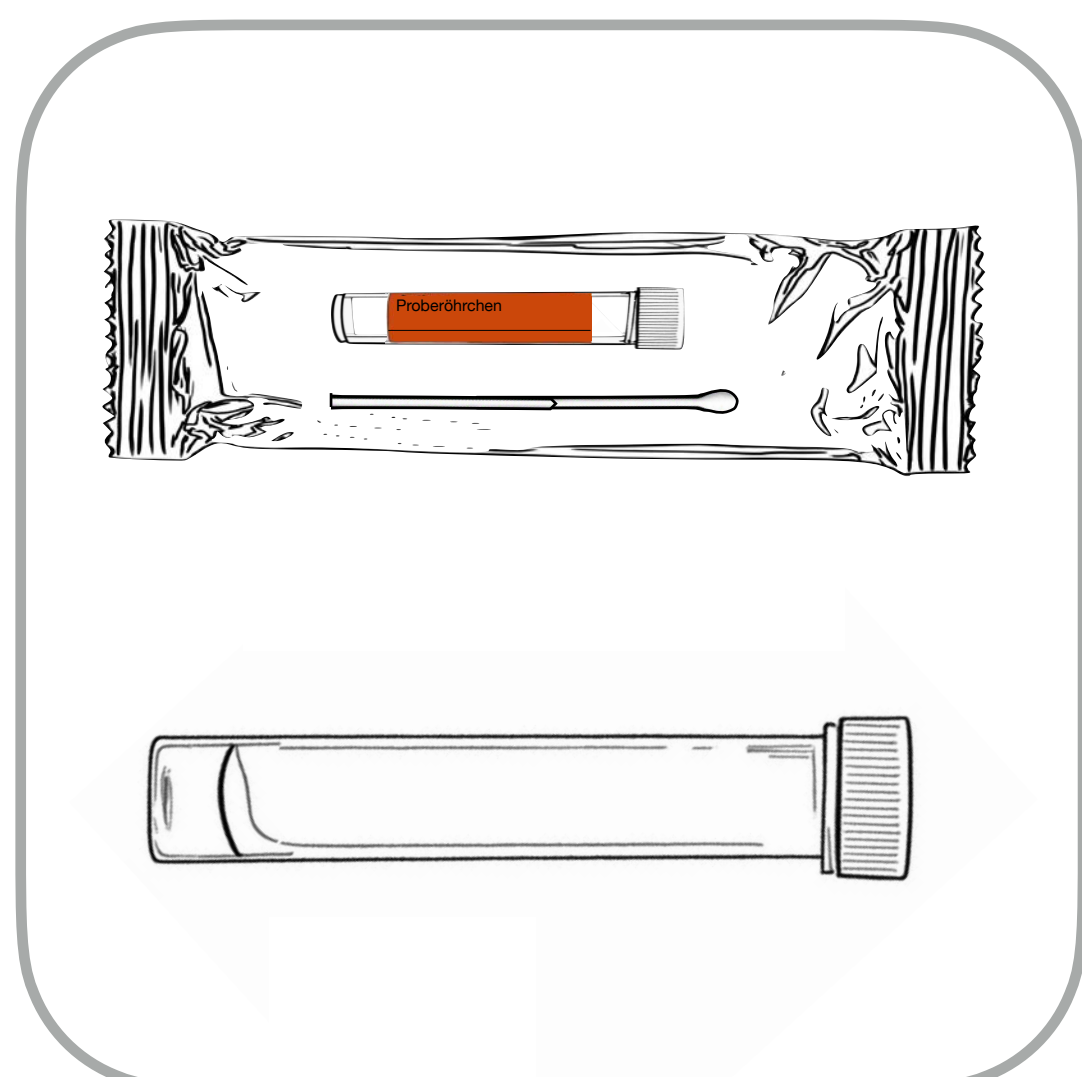

Umverpackungsröhrchen
für den Versand

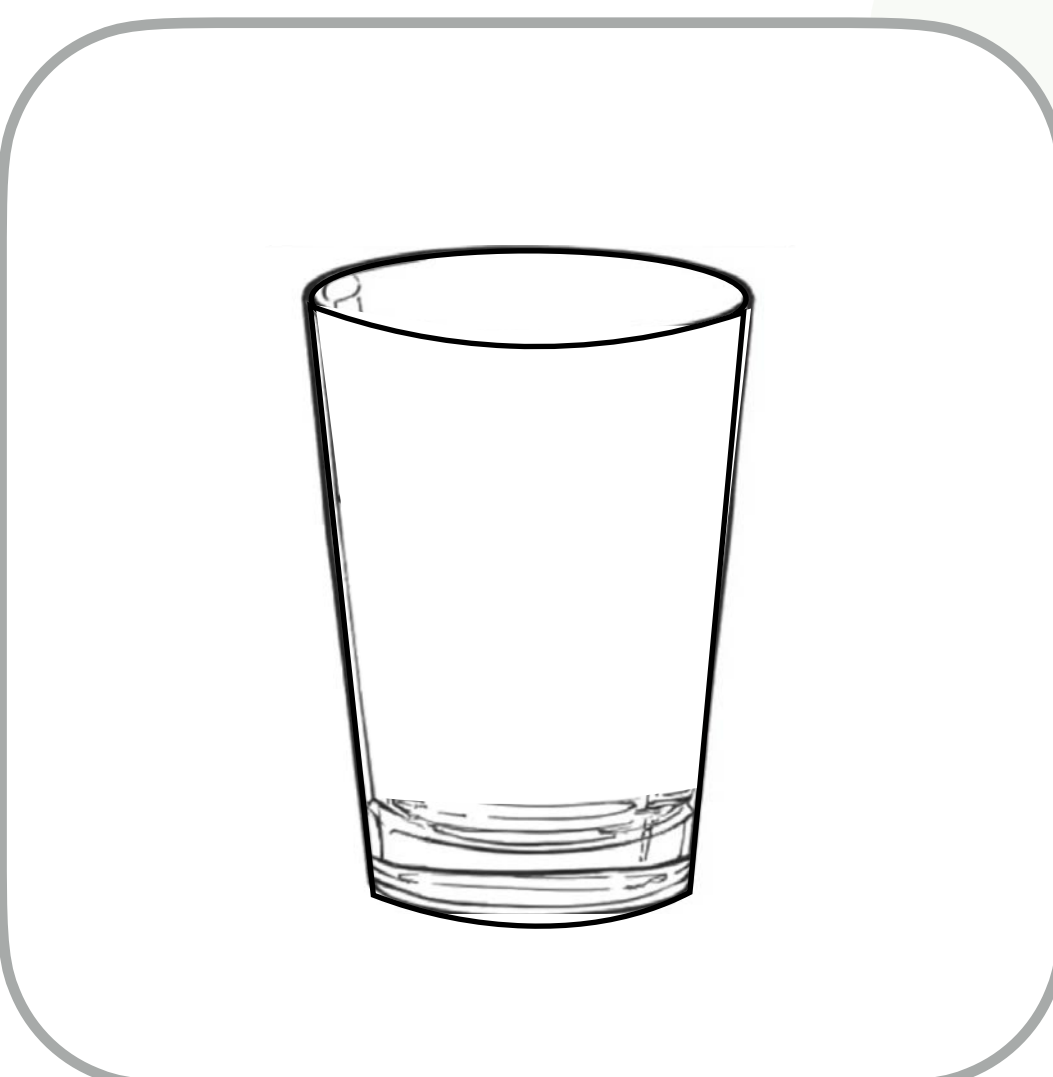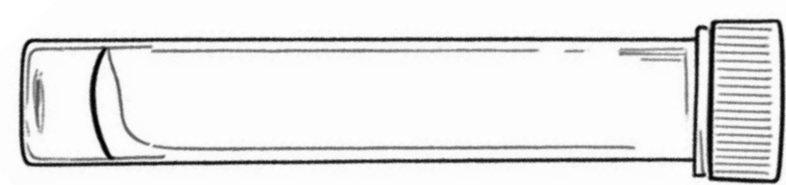

Abstellhilfe:
ein kleines Gefäß.

VORBEREITUNG

01




Hände mit Wasser
und Seife waschen.

02




Den Deckel seitlich am
weißen Rand anfassen und
vom Röhrchen abschrauben.

03

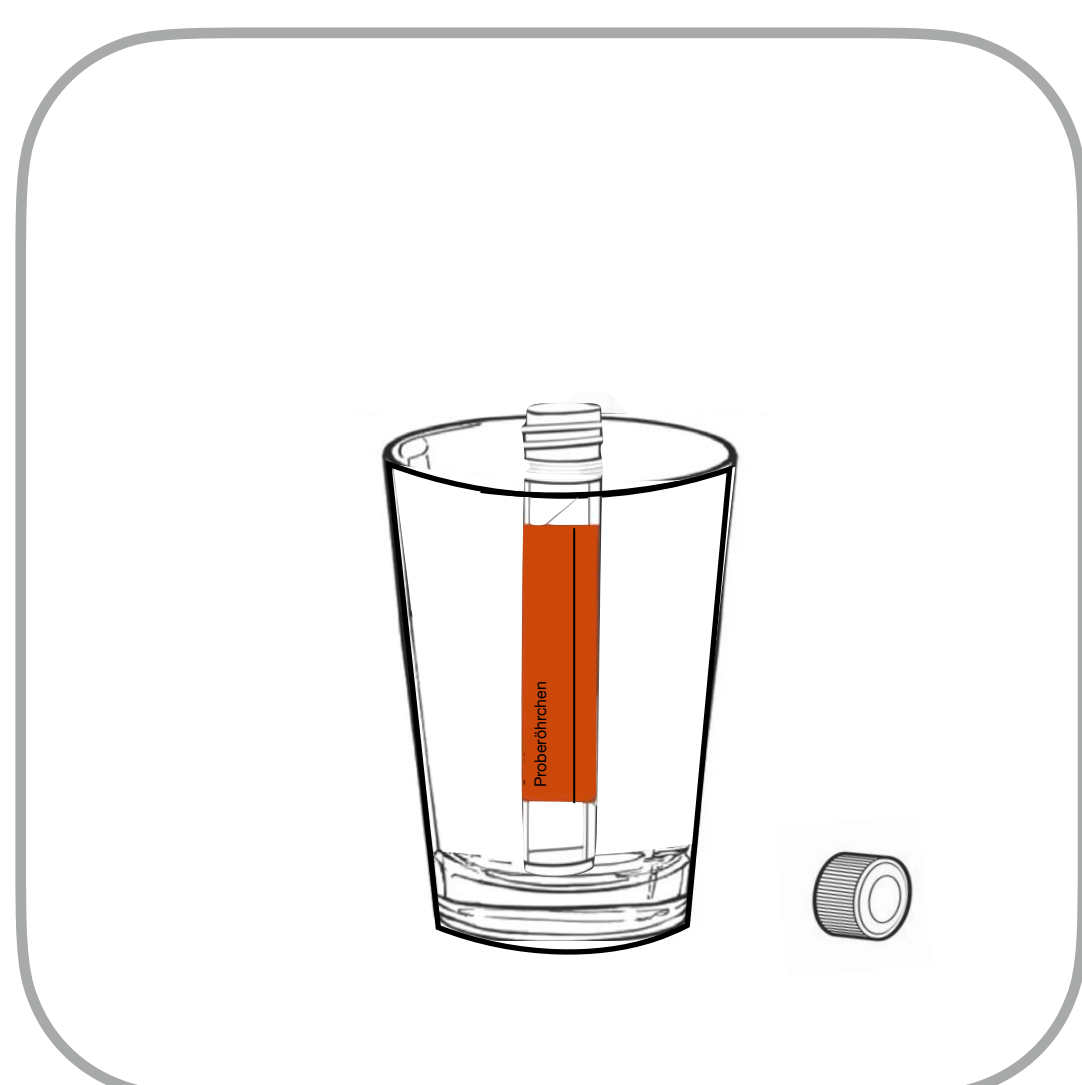

Den Deckel auf den
weißen Rand ablegen.
Das Röhrchen in
das Gefäß stellen.


04

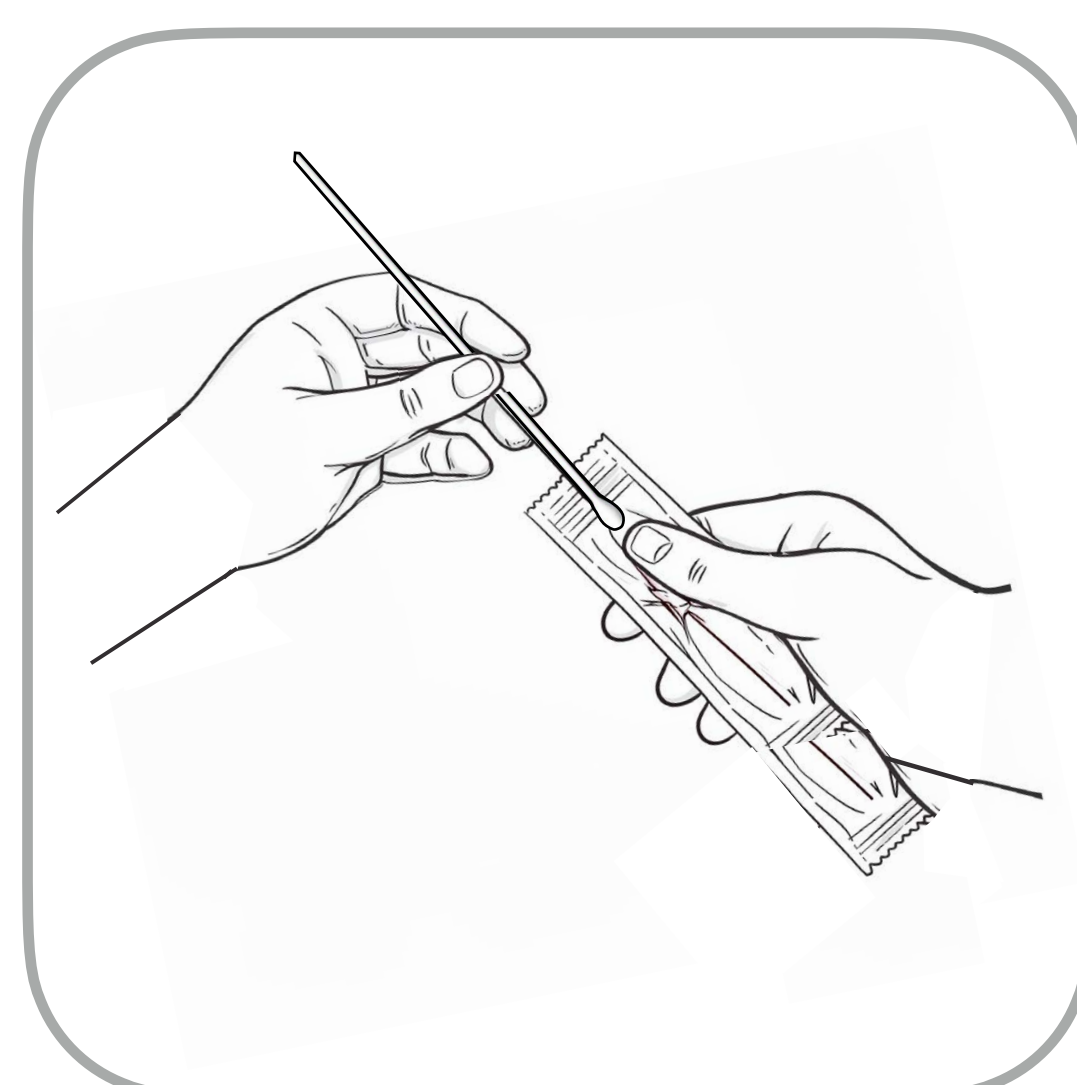

Abstrichtupfer aus
der Verpackung nehmen.


DER ABSTRICH

05

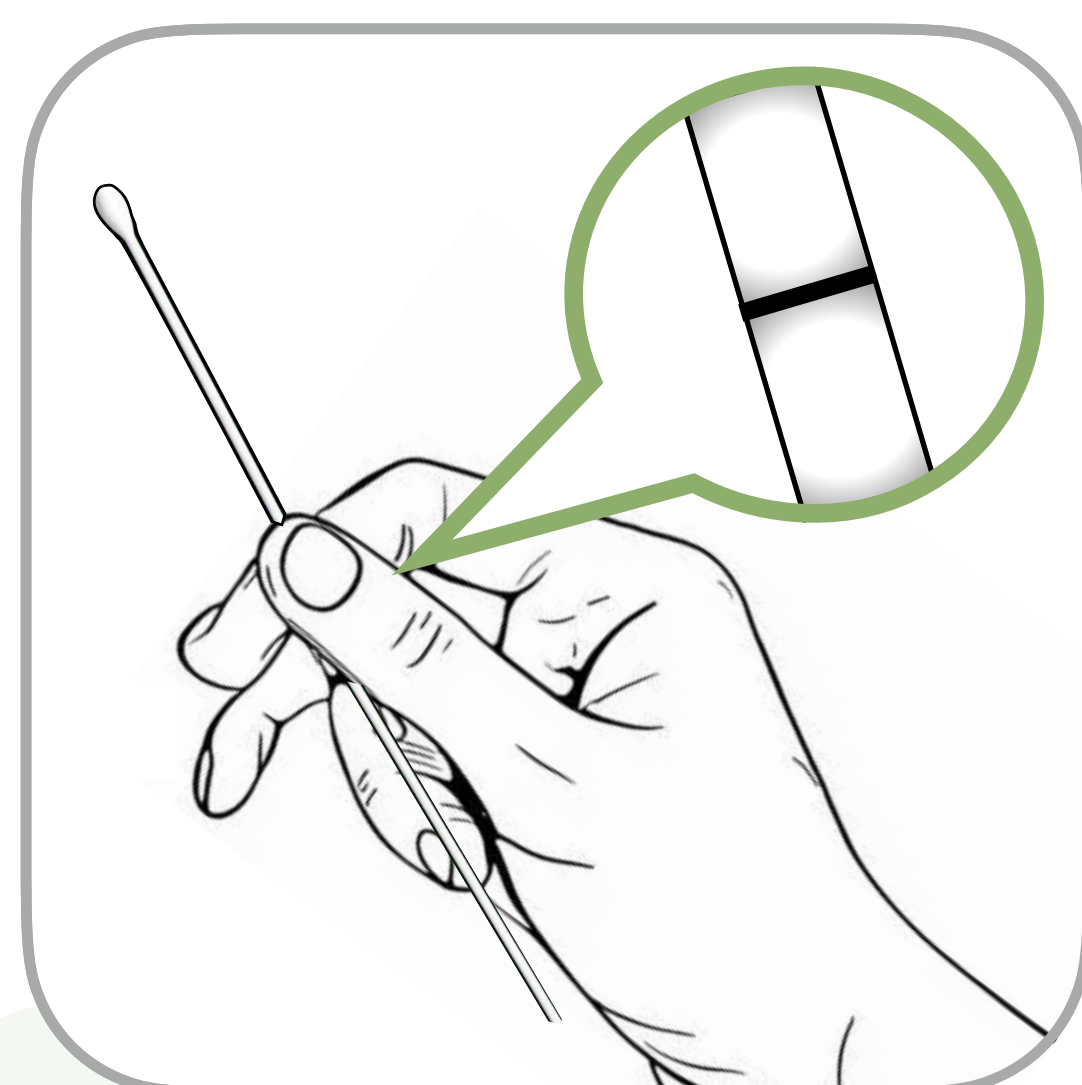

Abstrichtupfer an der
Markierung festhalten und
tief in den Rachen einführen.

06

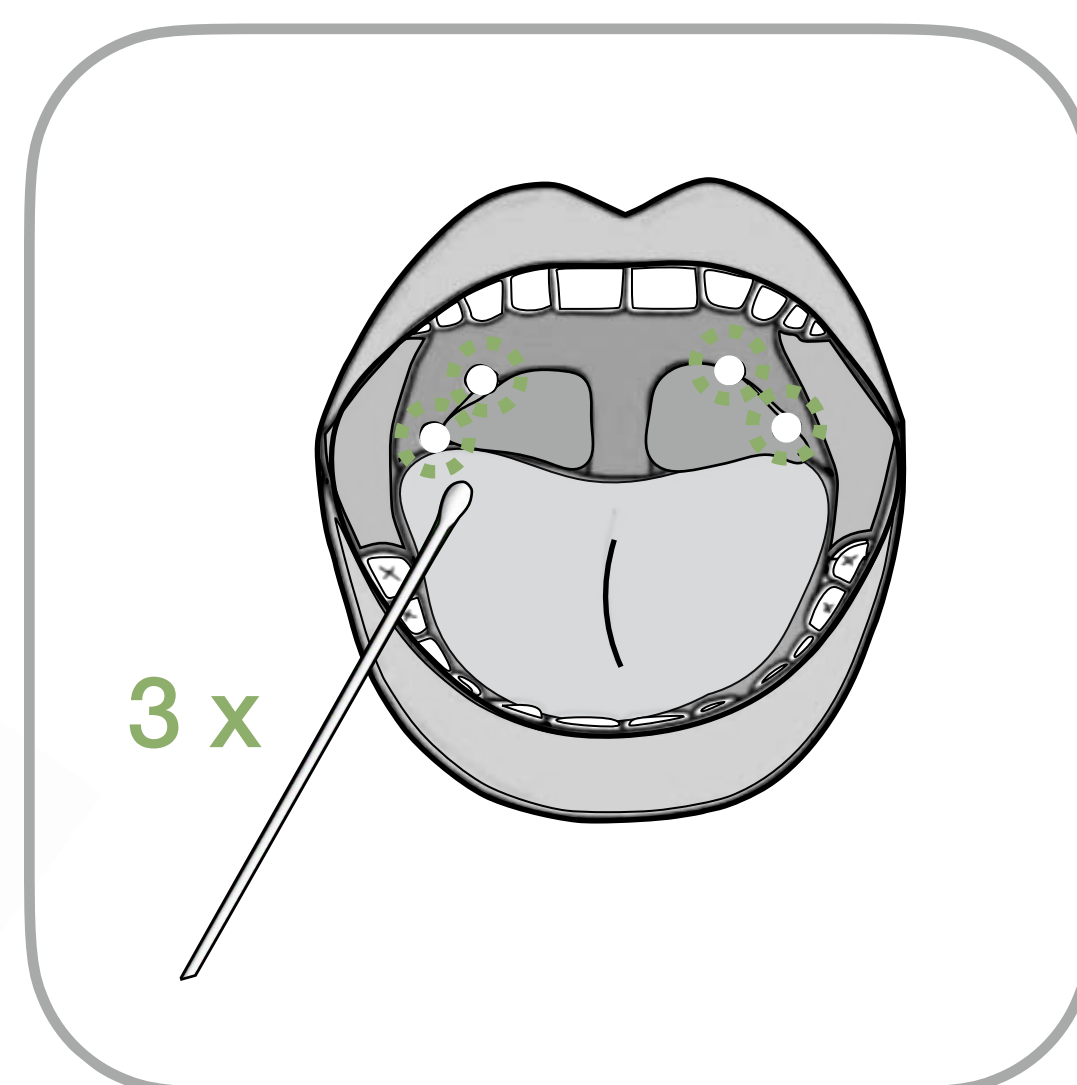

An den markierten Punkten
mit leichtem Druck dreimal
über die Schleimhaut streichen.






07

Den Tupfer mit dem Wattebausch nach unten in das Röhrchen stecken.




08

Das Tupferstäbchen an der Markierung abbrechen.

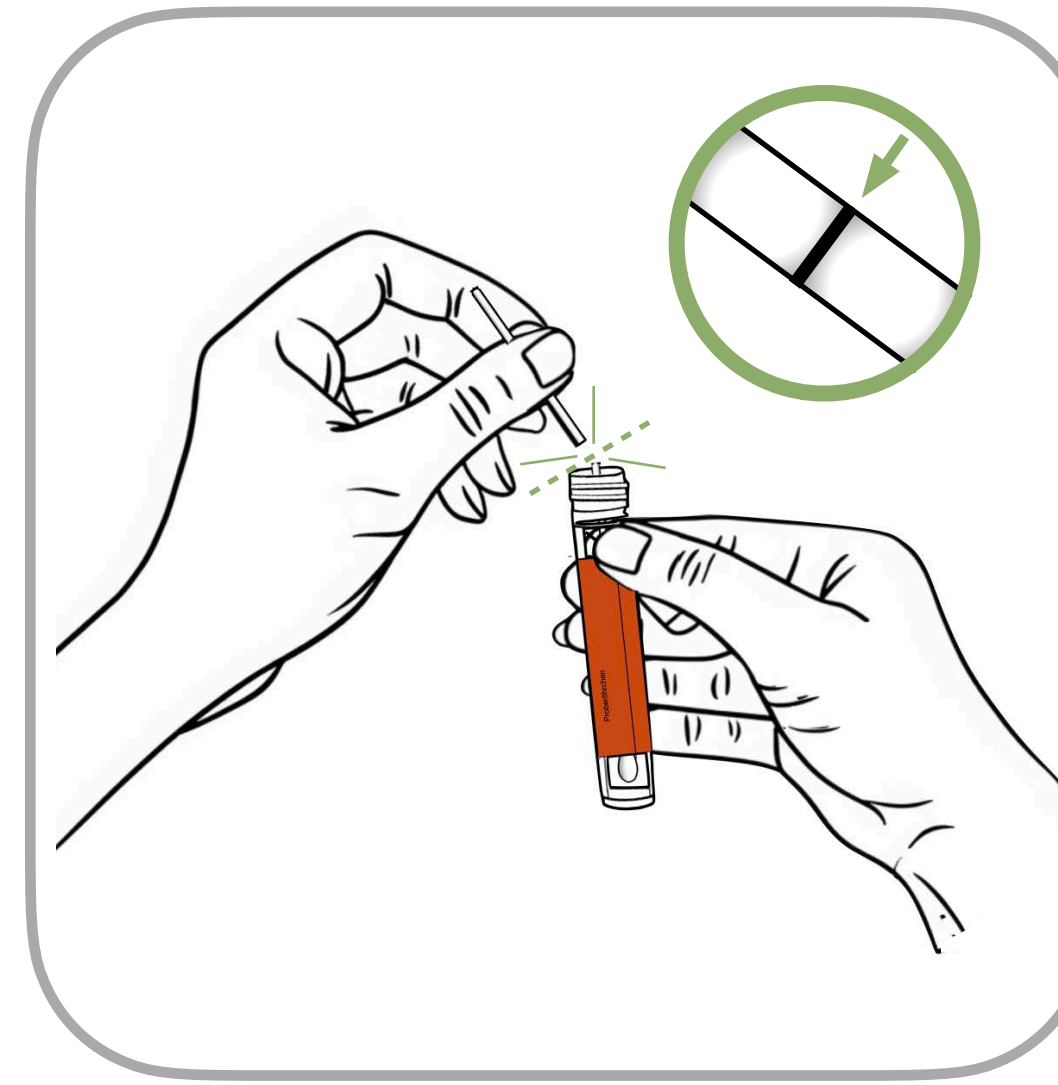


09

Zum Verschließen den Deckel NUR seitlich anfassen (NICHT die Alufolie berühren!) und den Deckel auf das Röhrchen schrauben.

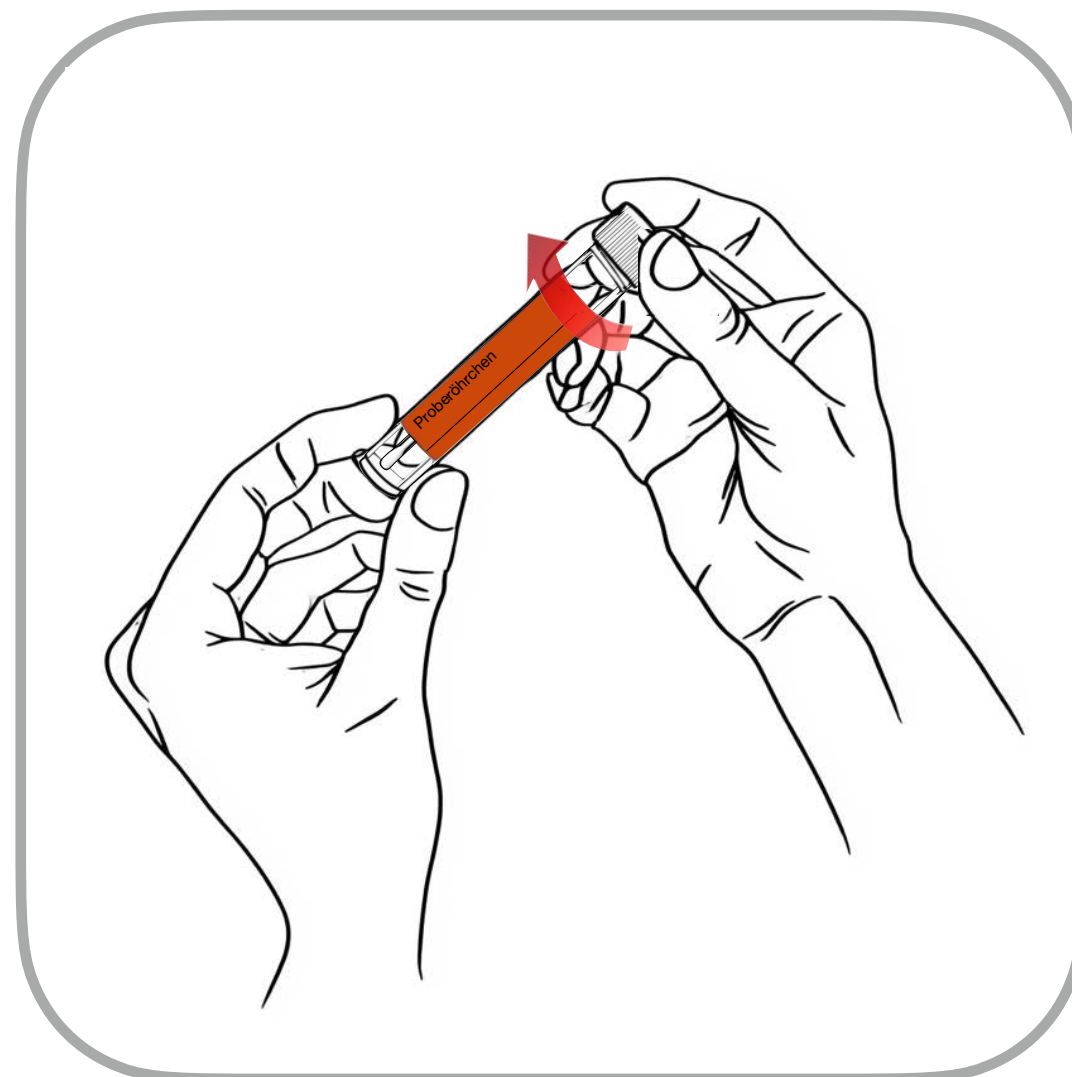

10


Das Probenröhrchen in das große Umverpackröhrchen stecken und dieses zuschrauben.

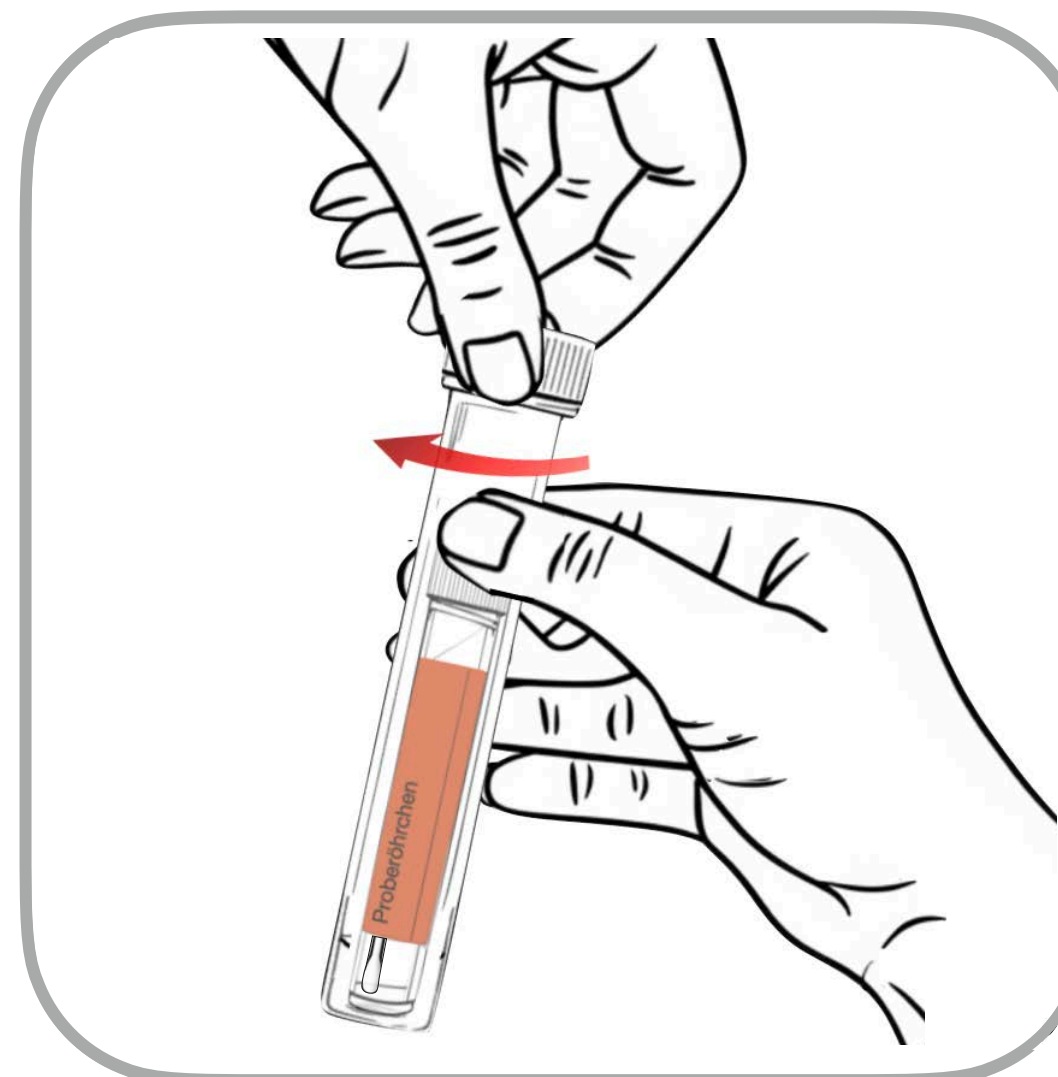

BESCHRIFTEN & VERSAND


11

Auf dem Laborschein Datum und Uhrzeit von der Entnahme des Abstrichs vermerken.

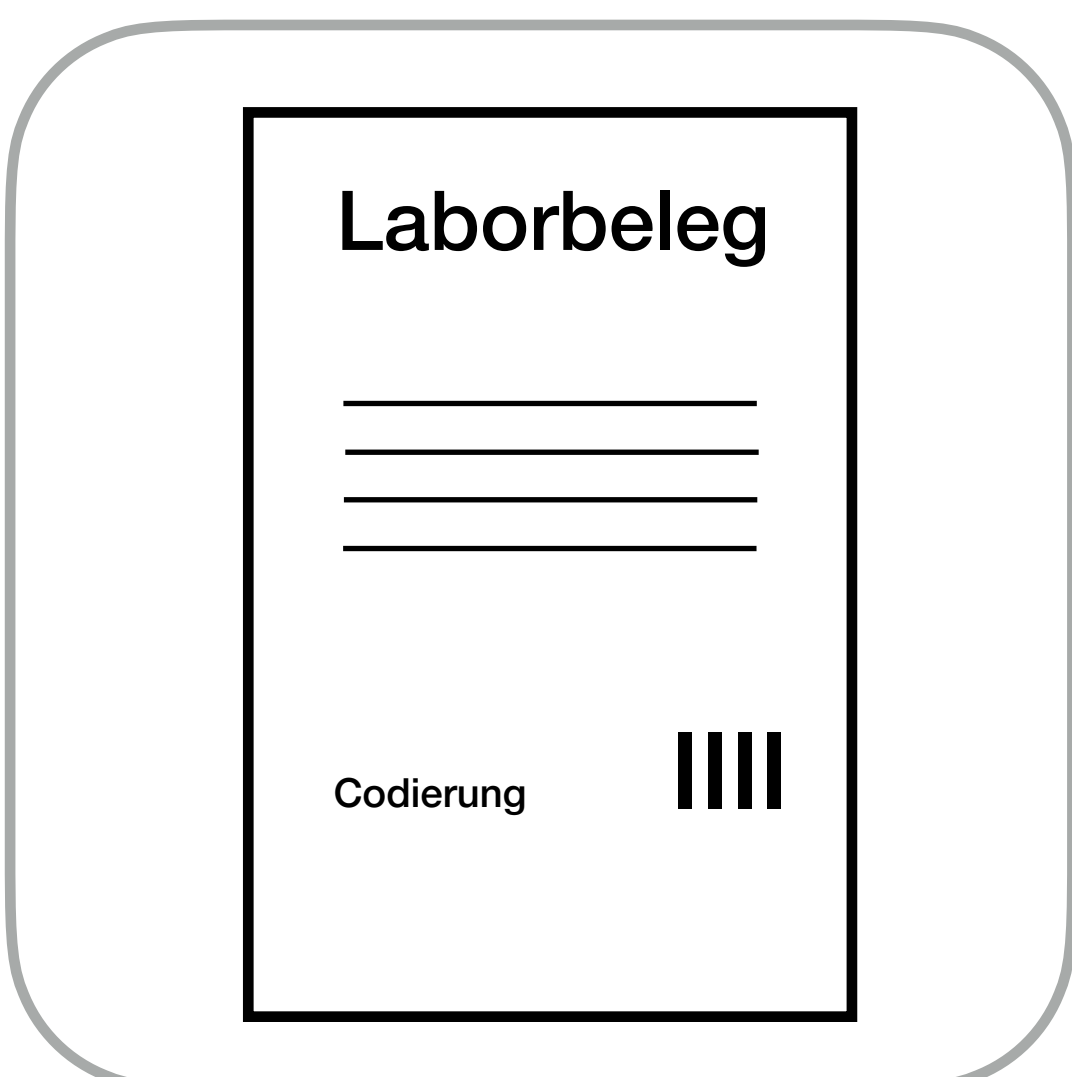

12

Den Laborschein mit der Probe in die Postbox legen.

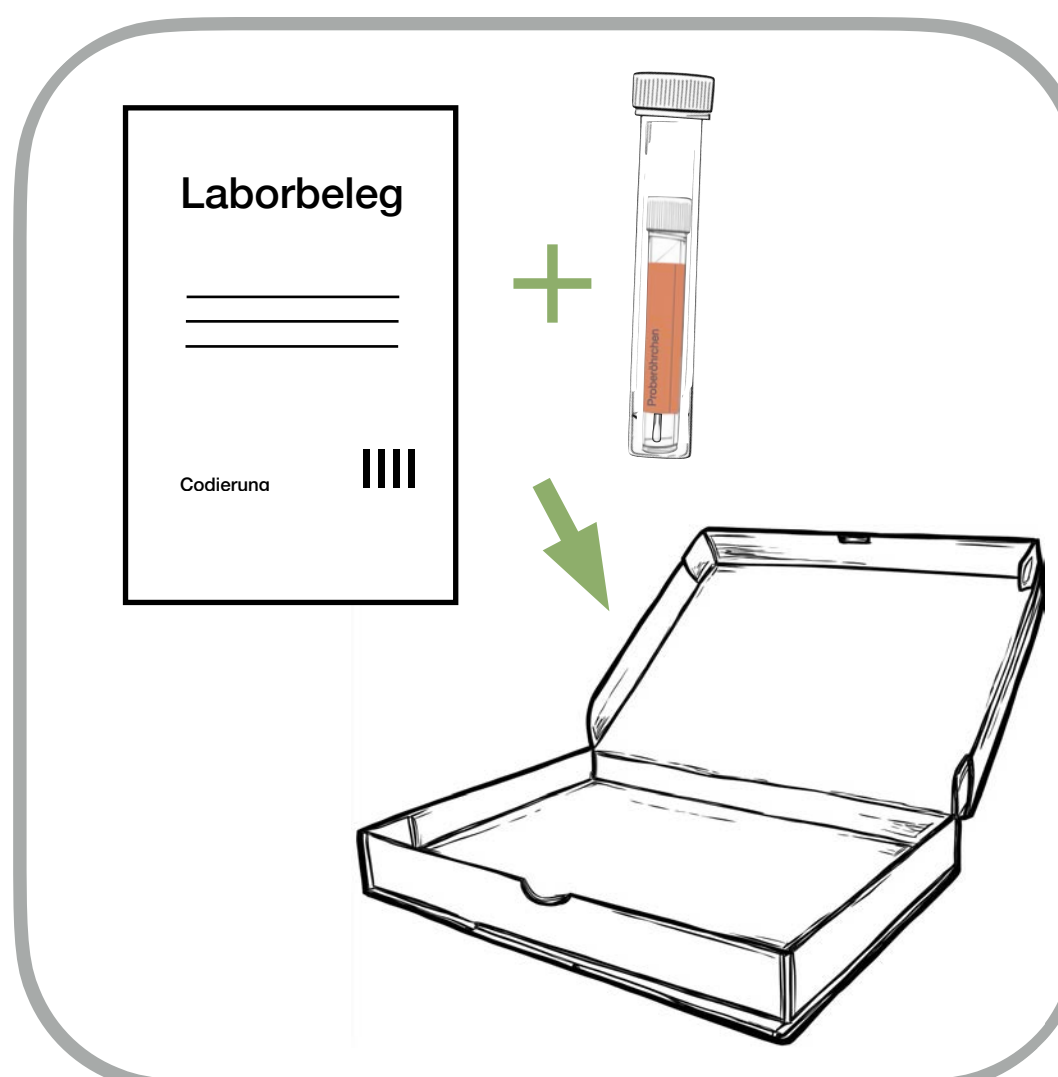


13

Die verschlossene Postbox in den Briefkasten werfen. Der Versand ist kostenlos.



HINWEIS:

Die Probe darf keiner Kälte ausgesetzt werden, wie z.B. im Kühlschrank oder über Nacht im Briefkasten.

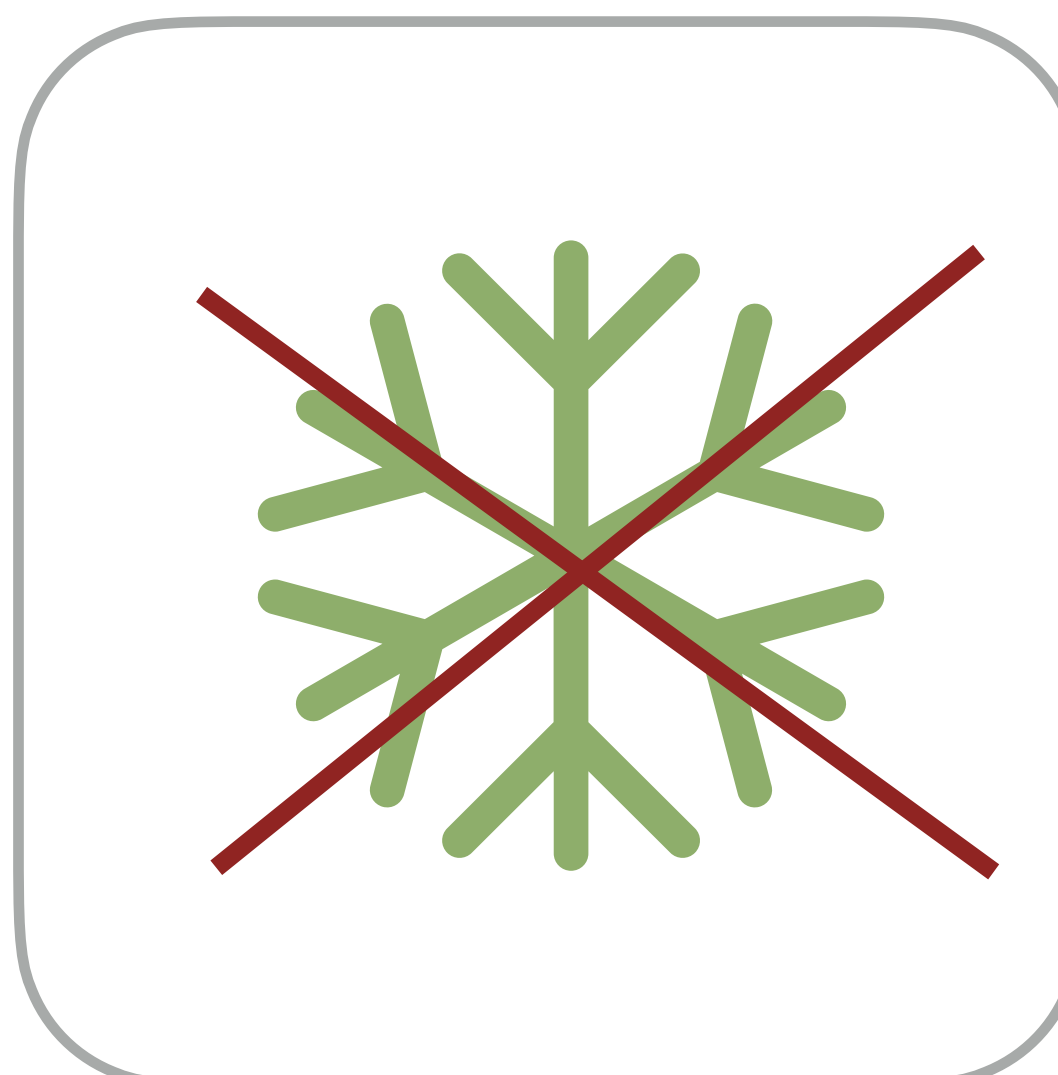

ERGEBNIS

14 Der Test ist kostenlos und anonym. Mit der Testnummer kannst du das Ergebnis bei deinem Gesundheitsamt erfragen.